

## **Anwendungsanleitung**

### **für das Antibeschlag Spray - Oculsoft Clear**

Grundsätzlich gilt bei allen Brillenglasarten –

vorher die Brille gründlich mit dem Oculsoft Clean Reinigungs-Spray säubern, es dürfen keinerlei Verunreinigungen wie Fettablagerungen, Make up und ähnliches auf der Oberfläche zurück bleiben.

#### **Für Brillengläser (oder auch andere Flächen) aus Glas gilt:**

- auf das gereinigte Glas von beiden Seiten Oculsoft Clear Antibeschlag-Spray aufsprühen
- mit einem sauberen Mikrofaser Tuch das aufgesprühte Antibeschlag-Spray auf den Brillengläsern verteilen, dass ein gleichmäßiger Film entsteht
- nicht zu lange einwirken lassen, sonst trocknet das Spray ein und beim Verreiben entstehen Schlieren!
- danach mit kreisenden Bewegungen Oberfläche trocken reiben

#### ***Prozedur zur Sicherheit gerne ein 2. mal wiederholen***

#### **Für Brillengläser aus Kunststoff gilt:**

Gleiche Anwendung wie oben – allerdings kann es hier notwendig sein, dies 3 - 4x zu wiederholen!

Dies liegt allerdings nicht am Antibeschlag-Spray, sondern an der Oberflächenstruktur des Kunststoffes bzw. den entsprechenden Beschichtungen.

Bei Brillengläsern aus Kunststoff, die bereits länger in Gebrauch sind reicht eine Wiederholung, da sich da die Oberflächenstruktur bereits verändert hat.